



Diversey

Oxivir Plus J-flex

Konzentrierter, flüssiger Desinfektionsreiniger für nicht poröse Oberflächen und nicht-invasive Medizinprodukte

Produktbeschreibung


Diversey Oxivir Plus J-flex ist ein hochkonzentrierter, flüssiger Desinfektionsreiniger für die Reinigung und Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten sowie aller harten, wasserfesten Oberflächen (z.B. Fussböden, Wände, Möbel, Ausrüstungen, usw.) und zahlreicher textiler Oberflächen. Durch die automatische Produkt-Verdünnung garantiert das J-Flex System totale Verbrauchskontrolle und gleichzeitig die korrekte Dosierung für eine ordnungsgemäße Desinfektion.

Eigenschaften

- Saure Formulierung auf Wasserstoffperoxid-Basis
- Wirksam gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen einschliesslich Bakterien, Viren, Pilze und Hefen
- Effektiver Reiniger
- Frei von Duftstoffen
- Basierend auf der patentierten AHP-Technologie (Accelerated Hydrogene Peroxid)

Vorteile

- Umfassend nach europäischen Normen getestet und wirksam gegen zahlreiche bedenkliche Krankheitserreger, einschließlich Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Vogelgrippe, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE und Norovirus
- Reinigt und desinfiziert in einem Schritt, dadurch Arbeitszeiterparnis
- Exzellente Reinigungsleistung für ein hervorragendes Reinigungsergebnis, Entkalkungswirkung und wirkt gegen wiederkehrenden Kalkaufbau
- Eignet sich hervorragend für den Einsatz auf beschichteten Bodenbelägen, da das Produkt keinen Schichtaufbau verursacht
- Geeignet für den Einsatz auf harten, wasserfesten Oberflächen und auf zahlreichen textilen Oberflächen
- Gutes Anwender-Sicherheits-Profil und hohe Anwenderakzeptanz
- Besonders gutes Umweltprofil. Wirkstoff zerfällt in Sauerstoff und Wasser
- **Nicht** für die Verwendung auf invasiven medizinischen Geräten bestimmt.

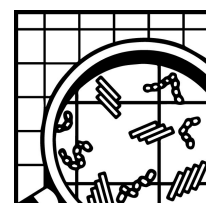



DiverseyTM

Oxivir Plus J-flex

Anwendungshinweise

Reinigung und Desinfektion mit der Sprühmethode

1. Verschmutzung mit feuchtem Tuch/Handpad entfernen.
2. Lösung mit einem sauberen Tuch/Mop auftragen oder direkt auf die Oberfläche sprühen.
3. Während der Kontaktzeit (siehe Tabelle) nass einwirken lassen und lufttrocknen lassen (nicht nachspülen oder trocken nachreiben!)

Reinigung und Desinfektion mit der Eimermethode

1. Grobe Verschmutzungen entfernen.
2. Lösung mit einem sauberen Mopp/Lappen auftragen und an der Luft trocknen lassen.
3. Während der Kontaktzeit (siehe Tabelle) nass einwirken lassen und lufttrocknen lassen (nicht nachspülen oder trocken nachreiben!)

Bitte beachten: Eimer zudecken. Schmutzeintrag in den Eimer vermeiden. Frische Lösung herstellen: Sobald die Lösung sichtbar verschmutzt ist, oder spätestens nach 8 Stunden.

Textile Oberflächen/Teppiche: Oberflächen zunächst an einer unauffälligen Stelle testen, anschliessend die gesamte Oberfläche behandeln. Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit mit frischem Leitungswasser sprühextrahieren.

Hinweis: Bei einer Desinfektion gegen das Norovirus sollte die Oberfläche vor der Desinfektion gereinigt werden. Damit kann die notwendige Einwirkzeit auf 2 Minuten reduziert werden (siehe Tabelle).

Wichtig: Kein warmes Wasser verwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Dosierung*

Drehen Sie den Dosierkopf des JFlex Gebindes entsprechend für die Befüllung der Sprühflasche oder des Eimers. Beide Einstellungen ergeben die gleiche Dosierung (3.5%).

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Technische Daten

Aussehen:	Klare, gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	< 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 2
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.03
Haltbarkeit:	720 Tage ab Produktion

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Achtung

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sowie Informationen zur Entsorgung dieses Produkts können dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Lagerung nur im Original-Gebinde. Extreme Temperaturen vermeiden. Produkt reagiert mit oxidierbaren Substanzen.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, die jeder VE JFlex beigelegt ist. Bitte nur mit entsprechender Wasserabsicherung betreiben. **Nach Gebrauch Wasser abdrehen und JFlex Verbindung lösen.** Wichtig: Nicht geeignet für den Einsatz auf porösen oder säureempfindlichen Oberflächen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Oxivir Plus J-flex

Materialverträglichkeit

Wichtig! Nicht mit anderen Produkten mischen. Kein warmes Wasser verwenden. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen ist Diversey Oxivir Plus JFlex für die Verwendung auf den Oberflächen der meisten medizinischen Geräten und Einrichtungen geeignet. **Nicht** für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten (z.B. chirurgische Instrumente, Dialysegerätschaften) geeignet.

Mikrobiologische Daten

	Testorganismen	Testmethode	Belastung	Konzentration	Einwirkzeit
Bakterien	Standardbakterien z.B. Staphylococcus aureus	EN 1276	hohe Belastung	3.50%	30 Sek
		EN 13727	hohe Belastung (Med. Bereich)	2.50%	5 Min
		EN 13697	hohe Belastung	3.50%	5 Min
		EN 16615	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.00%	5 Min
	Mycobakterien terrae (Tuberkuloseerreger)	EN 14348	niedrige Belastung	3.50%	10 Min
Pilze / Hefen	Candida albicans	EN 1650	hohe Belastung	3.00%	5 Min
		EN 13624	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.50%	15 Min
		EN 13697	hohe Belastung	2.50%	5 Min
		EN 16615	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.00%	5 Min
	Aspergillus niger	EN 1650	hohe Belastung	3.50%	15 min
		EN 13624	hohe Belastung (Med. Bereich)	2.00%	15 min
		EN 13697	hohe Belastung	3.50%	15 min
		EN 16615	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.00%	15 min
Viren	Rotavirus	EN 14476	hohe Belastung (Med. Bereich)	2.00%	5 Min
	Norovirus	EN 14476	niedrige Belastung	3.50%	2 Min
		EN 14476	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.50%	60 Min
	Poliovirus	EN 14476	hohe Belastung (Med. Bereich)	3.00%	5 Min
	Adenovirus	EN 14476	hohe Belastung (Med. Bereich)	2.50%	5 Min
	Vaccinia Virus	EN 14476	hohe Belastung (Med. Bereich)	2.50%	30 Sek

Wirksamkeit durch Erfüllung der europäischen Normen nachgewiesen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind vollständig biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Detergentien-Verordnung, EC 648/2004

Zulassungen

DE: BAuA-Registriernummer:: N-49246

CH: Zulassungsnummer: CHZN3147

Wirkstoffe pro 100g: 6,36g Wasserstoffperoxid, 2,5g Salicylsäure

Verfallsdatum: siehe Aufdruck auf dem Gebinde

Medizinprodukt: CE0044

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.17/04/2025 de-CH (K00228)