

DESIMATIC-S



Klarspüler und Entkalker für die thermische Aufbereitung in Steckbeckenautomaten

Einsatzbereich

Flüssiger Klarspüler und Entkalker für die maschinelle Aufbereitung in thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten, in denen Urinflaschen, Saugflaschen und Einsatzkörbe mit Utensilien aufbereitet werden.

Anwendung

Dosierung erfolgt automatisch und wird in Abhängigkeit von der ortsspezifischen Wasserhärte optimal eingestellt. Entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller wird das Konzentrat an die Dosierpumpe angeschlossen*.

Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und verringert den Produktverbrauch. Bei einer starken Verkalkung des Heizstabes ist vorab eine Entkalkung z.B. mit PEROTEX EK zu empfehlen.

Dosierempfehlung*: Wasserhärte ≤ 10 °dH - 0,5 ml/l
Wasserhärte > 10 °dH - 1,0 – 1,5 ml/l

*Dosierung durch Fachpersonal durchführen

Produkteigenschaften

- Gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarme, umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duftstoffen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Technische Informationen

Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20590

Zubehör

Zapfhahn Art.-Nr. 80075
Dispenser für Kanister Art.-Nr. 80301

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0616

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE