



DESIFOR-ONE

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und -reinigung



Einsatzbereich

Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen von nichtinvasiven Medizinprodukten und wasserfester Oberflächen und Böden in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-ONE-Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 12 Dosierfl. à 1 Liter Art.-Nr. 20558
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20499
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20498

Wirkstoffe

100 g enthalten 9,0 g 2-Phenoxyethanol, 10,0 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 9,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

Baua Reg.-Nr. N-63792, N-63793

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid: VAH-Liste, mit Mechanik, hohe Belastung EN 13727, EN 13624, EN 16615	1,0 % 15 Min. 0,5 % 30 Min. 0,5 % 30 Min.	gem. VAH/DGHM 20 °C, hohe und niedrige Belastung, getränkte Tücher (Standardtuch) können bis zu 28 Tage verwendet werden
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid und levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	0,5 % 5 Min.	20 °C, hohe und niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae) (EN 14348)	1,0 % 60 Min. 0,5 % 120 Min.	hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1,0 % 5 Min. 0,5 % 15 Min.	gem. DWV-/RKHeitlinie 12/2014
begrenzt viruzid (EN 14476) MVA	0,25 % 5 Min. 1,0 % 5 Min.	niedrige Belastung hohe Belastung
begrenzt viruzid PLUS (EN 14476) Adenovirus und Norovirus (MNV)	1,0 % 60 Min.	hohe Belastung

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Aufgeführt in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Hinweise

Nicht für Polycarbonat. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. DESIFOR-ONE als aminhaltiges Desinfektionsmittel nicht im direkten Wechsel mit aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln anwenden. Vor Umstellung eine gründliche Zwischenreinigung durchführen.

pH conc **0 2 4 6 8 10 14**

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0717

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE