

Desinfektionsmittelkonzentrat

BIGUANID FLÄCHE N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Reinigungsstark
- Keine Geruchsbelästigung
- Ideal für Linoleum und PVC



Produktbeschreibung

BIGUANID FLÄCHE N ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art und ist hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen.

BIGUANID FLÄCHE N bietet ein breites Wirkungsspektrum, ist tuberkulozid und wirksam gegen Noro-Viren. Es wirkt auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und enthält weder Aldehyde noch Phenole.

BIGUANID FLÄCHE N enthält einen Korrosionsschutz und bietet eine gute Materialverträglichkeit. Es ist besonders zu empfehlen für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten wie Atemmasken sowie Inkubatoren.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
Bakterien und Pilze							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid)*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	1 %	0,75 %	0,5 %	0,5 %	0,25 %
Behüllte Viren							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV		0,5 %			
Unbehüllte Viren							
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung				1 %	
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung					2 %
wirksam gegen SV40/Papovaviren	RKI/DVV					1 %	0,5 %
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV	ohne Belastung		0,25 %			
Ergänzende Prüfergebnisse							
tuberkulozid (M.terrae)	DGHM	hohe Belastung				0,5 %	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Anwendung

Flächenwischdesinfektion:

Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten BIGUANID FLÄCHE N Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Einsatz in Vliestuchspendersystemen:

BIGUANID FLÄCHE N eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den ONE SYSTEM-Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO WIPES Vliestuchspendersystemen.



BIGUANID FLÄCHE N

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von **BIGUANID FLÄCHE N** ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel HANSA CLEAN SPEZIAL zu empfehlen.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

16 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

Enthält: 15 - 30 % nichtionische Tenside, amphotere Tenside 5 - 15 %, Desinfektionsmittel, Duftstoffe.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-

nierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
BIGUANID FLÄCHE N	Sachet	40 ml	200	00-201-0004-01	16243288
	Dosierflasche	1 L	10	00-201-010	01834405
	Griffflasche	2 L	6	00-201-020-01	16202220
	Kanister	5 L	3	00-201-050	01899528
	Kanister	10 L	1	00-201-100	01899557
	Kanister	25 L	1	00-201-250	-
Dosierhilfen	Dosierflasche 1L	Dosierung: 25 - 60 ml	1	00-904-010	-
	Kanisterdosierpumpe	2 L/5 L/10 L	1	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn	2 L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

