



DESIFOR-forte AF neu

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art



Einsatzbereich

Aldehydfreies Produkt zur prophylaktischen Routinedesinfektion und Reinigung in medizinischen Einrichtungen, Heimen und der Lebensmittelindustrie für alle wasserfesten Oberflächen und Böden.

Gemäß MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Gemäß Biozidprodukte-VO: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Flächen mit DESIFOR-forte AF neu Lösung wischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 9 Dosierfl. à 1 Liter Art.-Nr. 20491
Kanister à 5 Liter (Typ "KH", hoch) Art.-Nr. 20492
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20493

Wirkstoffe

10,8g Didecyldimethylammoniumchlorid
6,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-84407

CHZN5718



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0620

Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich: bakterizid und levurozid	0,5 % 15 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 16615, hohe Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid und levurozid	0,5 % 15 Min.	EN 13697, hohe Belastung
Tuberkulozidie (M. terrae)	0,5 % 60 Min.	EN 14348, niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 % 15 Min.	DVV/RKI-Leitlinie
Noroviren (MNV)	1,0 % 60 Min.	EN 14476, hohe Belastung
Rotaviren	0,5 % 15 Min.	EN 14476, niedrige Belastung
Polyomaviren (Papovavirus SV 40)	1,0 % 15 Min.	EN 14476, hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder Test)
- HACCP-konform

Hinweis

- Produkt nicht für Oberflächen geeignet, die Polycarbonat enthalten (z.B. Schutzbrillen)
- Produkt nicht für die Anwendung auf semikritischen Medizinprodukten geeignet

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE